

### Welche BATHMATE-Pumpe benötige ich für meine Penisgröße?

Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen, vor allem, wenn es um Penispumpen geht. Wir möchten allen gerecht werden und bieten daher Bathmate-Modelle an, die für jede Penisgröße geeignet sind.

Es ist wichtig, sich für eine Hydropumpe zu entscheiden, die für die eigene Größe geeignet ist. Ein zu großes Modell büßt an Effektivität ein, da die Pumpe nicht in der Lage ist, den idealen Druck zu erzeugen, während zu kleine Modelle unbequem und ineffektiv sein können.


Hier findest Du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Du das perfekte Bathmate-Produkt für dich findest. Sobald Du Deine Größe kennst, kannst Du Dir in der entsprechenden Kategorie einen Überblick über die leistungsstarken Hydropumpen aus unserem Sortiment verschaffen!

Um die größtmöglichen Vorteile mit Deiner Pumpe von BATHMATE zu erzielen, ist es wichtig, die richtige Pumpengröße zu verwenden. Um die Größe Deines Penis richtig zu messen, folge einfach der nachstehenden Anleitung.

So misst Du Deine Penisgröße:


Es ist gar nicht so leicht, den eigenen Penis genau zu messen, insbesondere wenn es um den Umfang geht.

Schritt 1: Versetze Deinen Penis in den erigierten Zustand

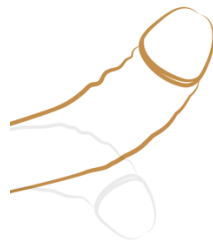


Du musst vollständig erigiert sein, um die Größe genau zu messen um sicherzustellen, dass Du die richtige BATHMATE-Größe wählst.

Schritt 2: Messe die Penis-Länge

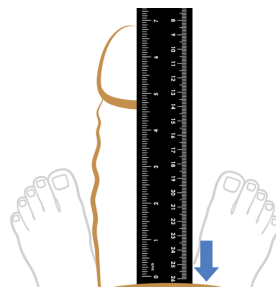

Messe Deine Penislänge im erigierten Zustand mit einem Lineal, das Du leicht auf Dein Schambein drückst und messe vom Knochen bis zur Penisspitze.

Schritt 3: Messe den Penis-Umfang

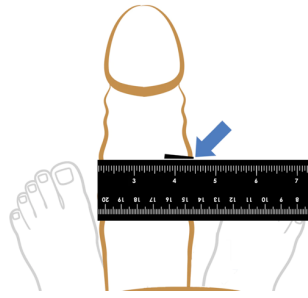

Wickel ein Maßband oder ein Stück Schnur um Deinen Penis und notiere den gesamten Umfang.

**Je nach Penisgröße kannst Du zwischen folgenden BATHMATE Modellen auswählen:**

Hydromax3  
HydroXtreme3  
Bis zu 8 cm Penislänge

Hydromax5  
HydroXtreme5  
Bis zu 13 cm Penislänge

Hydro7  
Hydromax7  
HydroXtreme7  
HydroXtreme7 Wide Boy  
Zwischen 13 und 18 cm Penislänge

Hydromax7 Wide Boy  
Zwischen 13 und 18 cm Penislänge

Hydromax9  
HydroXtreme9  
Zwischen 18 und 23 cm Penislänge

HydroXtreme11  
Mehr als 23 cm Penislänge